

Schritt 1: Aufkleben der ersten zwei Klebestreifen am Schirmträger



Schritt 2: Aufdrücken der zweiten Klebestreifen auf die zuvor aufgeklebten




Schritt 3: Abziehen der Schutzfolie und Schirmträger an möglichst gerader Fläche am Helm festdrücken



Hinweis: Die Klebeflächen müssen sauber sein!

Montage Visier am Schirmträger für die Kopfanwendung

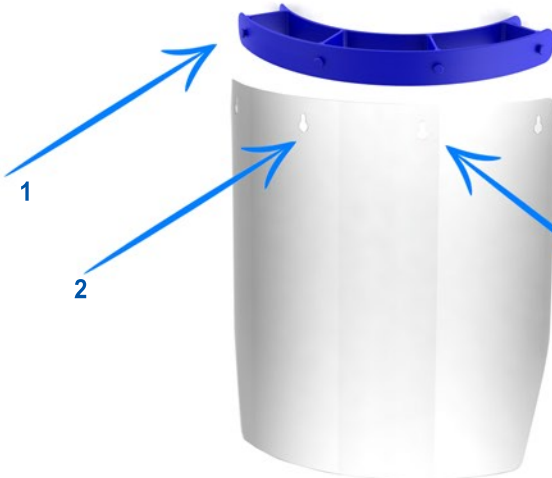

Visier mit Loch an der Aufnahme ansetzen und zum Fixieren runter ziehen

Pflegehinweis:
Visier nur mit einem weichen Tuch reinigen.
Nur Wischdesinfektion
Keine Wärmebehandlung